

Behandlungsschema

DIE ERSTE BEHANDLUNG

Vibration Geschwindigkeit	Zeit	Anzahl	Bemerkung
35-35 Hz	Ist abhängig wie das Pferd reagiert		

Stellen Sie das Pferd auf die Vibrations Platte und geben dem Pferd die Gelegenheit, sich an die Umgebung zu gewöhnen, bevor die Behandlung beginnt.

Starten Sie bei niedriger Frequenz, so dass das Pferd sich an die Schwingungen gewöhnt.

Nach einigen Minuten steigern Sie langsam die Frequenz, abhängig vom

Behandlungsprogramm bis auf die gewünschte Höhe. Wenn das Pferd sich mit den Schwingungen unbequem fühlt, machen Sie eine kleine Pause und fangen langsam wieder an. Wenn das Pferd sich an die Schwingungen gewöhnt hat, kann die eigentliche Behandlung anfangen. Die meisten Pferde sind schon beim ersten Mal an die Behandlung gewöhnt.

PFERDE MIT KNOCHEN PROBLEMEN

Vibration Geschwindigkeit	Zeit	Anzahl	Bemerkung
35-35 Hz	10-30min	1-2 Mal pro Tag	Behandlungen können und sollten angepasst werden, je nachdem wie das Pferd körperlich auf die Behandlung reagiert.

PFERDEN MIT SEHNENSCHADEN

Vibration Geschwindigkeit	Zeit	Anzahl	Bemerkung
40 Hz	30min	2-3 Mal pro Tag	Diese Behandlung hat sehr gute Ergebnisse für die Behandlung von Pferden mit Sehnenverletzungen gezeigt.

"Wir sind echte Pferdemenschen"

Es ist immer zu empfehlen die Behandlung der Sehnenverletzung durch einen Tierarzt überwachen zu lassen. Der Tierarzt kann klinische Untersuchungen über den Fortschritt des Heilungsprozesses machen. Für eine genauere Auswertung der Sehnenverletzung, sollte eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden.

KOLIKEN

Vibration Geschwindigkeit	Zeit	Anzahl	Bemerkung
50 Hz	45 min	2x Nacheinander mit 15 min Pause	Siehe unten

Bei einer schweren Kolik, kann das Pferd bei der maximalen Schwinggeschwindigkeit von 50 Hz bis zu 45 Minuten auf einmal behandelt werden. Stellen Sie nachher das Pferd für 15 Minuten in seinen Stall/Box. Wenn das Pferd innerhalb dieser Zeit nicht abäppelt, stellen Sie das Pferd wieder für 45 Minuten auf die Vibrations Platte.

Es ist sehr wichtig, um die Zustand des Pferdes kontinuierlich zu beobachten.

Benachrichtigen Sie immer Ihren Tierarzt wenn Sie ein Pferd mit Kolik haben.

BEHANDLUNG FÜR ALLGEMEINE STEIFIGKEIT UND ANDERE PROBLEME

Vibration Geschwindigkeit	Zeit	Anzahl	Bemerkung
40 Hz	30min	1-3 Mal pro Tag	Anzahl der Behandlungen können und sollten angepasst werden, je nachdem wie das Pferd körperlich auf die Behandlung reagiert.

Nicht bekannt: Auswirkungen auf die Schwangerschaft. Wir empfehlen keine Behandlung von trächtigen Stuten oder Stuten die trächtig werden sollten.

Wir empfehlen das Pferd vor Anfang des Training zum auf wärmen auf die Vibrations Platte zu stellen und nach dieser Behandlung das Pferd einige Minuten in den Stall zu stellen, um das Pferd in die Lage zu versetzen urinieren zu können.

"Wir sind echte Pferdemenschen"